

Reinigings/desinfectievoorschrift

t.b.v. ROHO® zitkussens



Uw ROHO® product reinigen en ontsmetten

Reinigen en ontsmetten zijn twee afzonderlijke processen. Reinigen komt eerst en daaropvolgend het ontsmetten. Bij gebruik voor meerdere patiënten moet het ROHO® kussen voor elk gebruik bij een andere patiënt gereinigd, ontsmet en gecontroleerd worden op een goede werking.

De hoes reinigen:

Verwijder eerst de hoes van het kussen. Was deze in de wasmachine als fijne was met lauw water (40°C) en een zachte zeepsoort, of veeg de hoes schoon met een neutrale zeep en lauw water. Droog in de wasdroger op de lage stand.

De hoes ontsmetten:

Was met de hand in warm water waaraan 125 ml bleekmiddel per liter water is toegevoegd en spoel daarna zorgvuldig uit. Ter ontsmetting kan de hoes ook in de wasmachine worden gewassen in warm water (60°C).

Let op: Volg de veiligheidsrichtlijnen op de verpakking van het bleekmiddel.

Het kussen reinigen:

Verwijder de hoes, sluit de ventielen en plaats het kussen in een grote gootsteen of badkuip. Gebruik een zachte plastic borstel, spons of doekom alle oppervlakken van het kussen af te nemen. Om beter bij de bodem te komen, plaatst u het kussen over de rand van de gootsteen of badrand. ROHO, Inc. raadt het gebruik aan van afwasmiddel, wasmiddel of een ander universeel reinigingsmiddel voor algemeen gebruik.

Voor het schoonmaken in instellingen mag een universeel ontsmettingsmiddel voor huishoudelijk gebruik worden gebruikt. Spoel af met ruim water. Dep droog met een handdoek of leg het kussen te drogen.

Het kussen ontsmetten:

Herhaal de bovenstaande reinigingsinstructies met een desinfectans dat voldoet aan de eisen voor infectiebestrijding (ROHO, Inc. beveelt een tuberculocide ontsmettingsmiddel aan). U kunt ook een oplossing gebruiken van 125 ml bleekmiddel op een liter warm water. Houd het schone kussen gedurende 10 minuten vochtig met de bleekmiddeloplossing. Spoel af met ruim water en droog volgens de instructies. Let op: De meeste desinfectansen zijn veilig indien gebruikt volgens de aanwijzingen voorverdunding van de fabrikant.

Het kussen steriliseren:

ROHO raadt ten zeerste af sterilisatiemethoden te gebruiken die bij een temperatuur van meer dan 93°C werken. Hoge temperaturen bespoedigen het verouderingsproces en kunnen schade veroorzaken aan het kussen. Indien de voorschriften van de instelling sterilisatie voorschrijven, mag dit op voorwaarde dat dit gebeurt met geopende ventielen en bij de laagst mogelijke temperatuur en gedurende de kortst mogelijke tijd. Sterilisatie door middel van een gas wordt verkozen boven autoclaveren. Geen van beide methoden wordt echter aanbevolen. Zorg er bij stoomautoclaveren voor dat alle ventielen geopend zijn.

Let op: Gebruik GEEN lotions op basis van olie of lanoline, of ontsmettingsmiddelen op basis van fenol op uw kussen. Deze kunnen het neopreen aantasten.

